

Teeth whitening Start kit



Vitare tänder på 30 minuter

Beconfi®dent peroxidfria tandblekningsgel verkar effektivt och skonsamt. Gelen avlägsnar fläckar på tänderna. Den peroxidfria gelen har ett pH-värde som är skonsamt för munnen och tänderna och innehåller inga syror som sliter på emaljen.

Innehåll: 3 munskenor, 10 ml tandblekningsgel, instruktionsanvisning

**Luft i tuben
är normalt**

beconfident®

Så gör du

För bästa resultat, läs hela instruktionen noga innan du startar behandlingen.

1. Forma munskenan genom att doppa den i ca 80° vatten i 2–3 sekunder, till den börjar krympa. Skaka av vattnet och stoppa skenan i munnen (du kommer inte att bränna dig). Tryck med fingrarna och använd tungan för att forma skenan efter dina tänder. Sug samtidigt ut luften. Är du inte nöjd upprepar du proceduren med samma skena. Skölj skenan i kallt vatten.

KLIPP AV FLÄRPEN.

2. Borsta tänderna lätt utan tandkräm före varje behandling.

3. Alternativ 1

Rengör händerna noggrant. Pressa ut ca en droppe per tand direkt på fingret. Applicera sedan gelen genom att fördela på de tänder du vill bleka. Placera därefter munskenan på den tandrad som ska blekas. Båda tandraderna kan blekas samtidigt.

Alternativ 2

Applicering direkt i munskena. Applicera en tunn sträng gel i munskenan, från kant till kant. Var noga med att fördela gelen så att hela tandradens yta blir täckt med gel. Placera därefter munskenan på den tandrad som ska blekas. Båda tandraderna kan blekas samtidigt.

4. Låt verka i 15 minuter.

5. Spotta ut och skölj med vatten. Borsta sedan lätt utan tandkräm.

6. Upprepa behandlingen en gång per dag i 10 dagar, eller tills du är nöjd med resultatet. Produkten kan användas upp till 20 dagar under en tremånadersperiod.

För ett lyckat resultat

Antal behandlingar som krävs innan önskat resultat uppnås är individuellt. Resultatet varierar beroende på tändernas missfärgning samt genetiska förutsättningar. Observera att skalfasader, lagningar och andra tandarbeten inte kommer att blekas. Små vita fläckar kan synas på tänderna direkt efter blekning. Det är normalt och fläckarna försvinner inom 4–6 timmar.

Upprepa behandlingen tills önskat resultat är uppnått. Vi rekommenderar att hela behandlingen slutförs. Vid behov finns tandblekningsgel som refill.

För bästa och mest varaktiga resultat, borsta dagligen med beconfi®Dent Multifunctional WhiteAmin® tandkräm som även innehåller vitaminer.



Varningsföreskrifter

Vid normalt intag, kontakta giftcentralen 112 och ange förpackningens innehåll. Använd inte produkten om du lider av irriterat eller inflammerat tandkött, om du bär tandställning, har blödande tandkött eller om du är allergisk mot något av de verksamma ämnena. Förvara produkterna torrt och svalt. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Ej för användning på barn. Innehåller natriumfluorid (0,05%)

Allmänna rekommendationer

- Undvik juice, te, kaffe och andra färgade drycker under fyra timmar efter behandling.
- Tandblekning ska ej göras på personer under 18 år.
- Om du är gravid eller ammar, rådgör med din läkare innan behandling.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Ej för användning på barn. Innehåller natriumfluorid (0,05%)

Förvaring

- Bäst föredatum finns på produktens förpackning.

Eventuella biverkningar

Inga kända biverkningar är rapporterade.

Ny tub med tandblekningsgel

- Mer hygienisk
- Lättare att använda
- Lätt att ta med sig

Notera att tuben innehåller luft för att blekgelen ska ha en så hög viskositet som möjligt

Fler produkter för ditt vita leende

För mer information om alla våra produkter för ett vitare leende och en fräschare känsla, besök www.beconfident.se
Vid frågor, kontakta Kundtjänst via e-post kundtjanst@beconfident.se

Luft i tuben
är normalt

beconfident®

www.beconfident.se www.beconfident.info

Guide

