

Teeth whitening Touch up Cleaning pen



Rengör och fräschar upp ditt vita leende

Beconfi® dent peroxidfria tandblekningsgel verkar effektivt och skonsamt.

Gelen avlägsnar fläckar på tänderna. Den peroxidfria gelen har ett pH-värde som är skonsamt för munnen och tänderna och innehåller inga syror som sliter på emaljen.

Innehåll: 1 tandblekningspenna, instruktionsanvisning

beconfident®

Så gör du

För bästa resultat, läs hela instruktionen nogra innan du startar behandlingen.

1. Borsta tänderna lätt utan tandkräm

före varje behandling.



2. Skruva lätt på pennans baksida

för att pressa ut tandblekningsgelen. Pensla ett tunt lager av gelen på de tänder du vill bleka. Var nogra och pensla även mellan tänderna. Vi rekommenderar att du bleker en tandrad åt gången.



3. Låt gelen torka i

3 minuter. Undvik att läpparna kommer i kontakt med tänderna under dessa 3 minuter då gelen kan gnidas av.



4. När gelen torkat verkar den under dagen, och försvinner efter hand.



För ett lyckat resultat

Antal behandlingar som krävs innan önskat resultat uppnås är individuellt. Resultatet varierar beroende på tändernas missfärgning samt genetiska förutsättningar. Observera att skalfasader, lagningar och andra tandarbeten inte kommer att blekas.

Upprepa behandlingen tills önskat resultat är uppnått. Vi rekommenderar att hela behandlingen slutförs.

För bästa och mest varaktiga resultat, borsta dagligen med Beconfident® Multi-functional WhiteAmin™ tandkräm som även innehåller vitaminer.

Varningsföreskrifter

Vid onormalt intag, kontakta giftcentralen 112 och ange förpackningens innehåll. Använd inte produkten om du lider av irriterat eller inflammerat tandkött, om du bär tandställning, har blödande tandkött eller om du är allergisk mot något av ämnena i produkten. Förvara produkterna torrt och svalt. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Ej för användning på barn. Innehåller natriumfluorid (0,05%).

Förvaring

Bäst föredatum finns på produktens förpackning.

Eventuella biverkningar

Inga kända biverkningar har rapporterats.

Allmänna rekommendationer

- Undvik juice, te, kaffe och andra färgade drycker under fyra timmar efter behandling.
- Tandblekning rekommenderas ej för personer under 18 år.
- Om du är gravid eller ammar, rådgör med din läkare innan behandling.
- Förvara samtliga tandblekningsprodukter och tillbehör oåtkomligt för barn och djur.

Fler produkter för ditt vita leende

För mer information om alla våra produkter för ett vitare leende och en fräschare känsla, besök www.beconfident.se
Vid frågor, kontakta Kundtjänst via e-post info@beconfident.se

Guide



beconfident®

www.beconfident.se www.beconfident.info

Designed in Sweden – made in USA. Version 1/2015